

збудників інфекцій у препаратах, виготовлених на основі крові людини.



Обережно: Продукт містить гентаміцин. Його не можна використовувати для лікування пацієнтів, у яких спостерігається алергія на гентаміцин або схожі антибіотики.

Примітка: Необхідно забезпечити можливість відстеження даного препарату. Крім того, у цій сфері можуть діяти вимоги законодавства вашої країни.

Примітка: Медичні вироби, що використовуються разом з цим виробом, мають застосовуватися за призначенням.

Примітка: Утилізація цього виробу здійснюється відповідно до місцевого законодавства про утилізацію медичних приладів.

Інструкції з використання

1. Перед використанням урівноважувати протягом щонайменше 2 годин у 5-6% розчині CO₂ при 37 °C. Час, потрібний для досягнення повної рівноваги, залежить від об'єму середовища та масляного покриття.
2. Пересадити зиготи з середовища для запліднення у свіжі краплі або лунки з попередньо урівноваженим ORIGIO® Sequential Cleav™ та повернути чашку до медичного інкубатора.

Пересадження ембріона

1. Ембріони готують та пересаджують до матки в попередньо врівноваженому свіжому середовищі ORIGIO® Sequential Blast™ або обраному для пересадження середовищі.
2. Перед використанням промити катетер середовищем, обраним для пересадження.

Кожна лабораторія має самостійно вирішувати, яке середовище використовувати для кожної окремої процедури.